

\\ シムジア オートクリックスを使用している患者さんへ //

注射前の注意点

～キャップの外し方について～

シムジア[®]オートクリックス[®]を安全かつ適正にご使用いただくために、
キャップを外す際には、以下の点にご注意ください。



キャップを左右に真っ直ぐに引っ張り、
外すようにしましょう。



オートクリックス[®]のキャップ
を正しく外せていますか？



キャップをひねらない

キャップをひねることにより、
注射針が出ないなどの不具合が生じる
ことがあります。



注射前に、再度キャップを
していませんか？



一度外したら、
再度キャップをしない

再度キャップをすることにより、
注射前に誤って薬液が飛び出るなどの
誤作動を起こすことがあります。